

Förlossning



Metrastop Ballongkateter - Steril, engångs, latexfri

Kateter med ballong för att hindra uterin blödning efter förlossning. Metrastop Ballongkateter är utrustad med två ballonger och en blodpåse. Alla tre är färgkodade.

- Den yttre ballongen fylls med en 60 ml spruta steril saltlösning genom den blå slangen.
- Den inre ballongen fylls med sex stycken 60 ml-sprutor med luft (350 cm³) genom den transparenta slangen. Ballongen kan överfyllas till max 420 cm³.
- Blodpåsen har en transparent slang med röd färgkodning. Luftventilen ska alltid vara påkopplad för att kunna övervaka blodförlusten.

Katetern i sin helhet väger endast 30 gram, vilket minimerar risken för att ballongen skulle glida ut. Uppblåsning och tömmande av ballongernas innehåll är väldigt enkelt och det är även möjligt att omplacera katetern om den skulle missplaceras vid första försöket.

Innehåller kateter, 60 ml spruta & påse för bloduppsamling

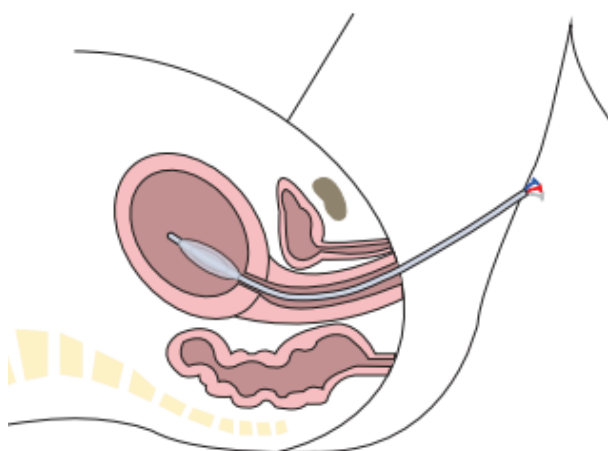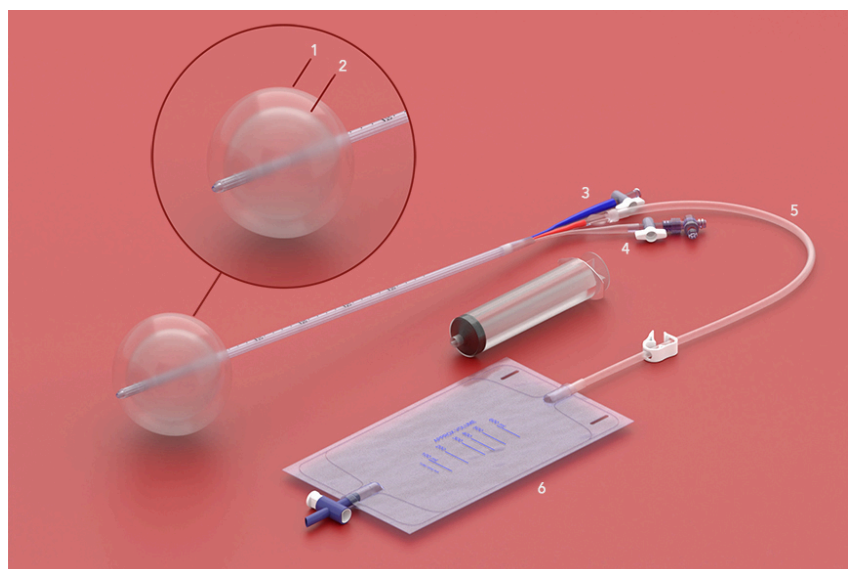

Art.nr.	Namn	Antal/fp
720264	Metrastop Ballongkateter	2