

## Føding



### Metrastop ballongkateter – sterilt, engangs, lateksfritt

Kateter med ballong for å forhindre livmorblødning etter fødsel. Metrastop ballongkateter er utstyrt med to ballonger og en blodpose. Alle tre er fargekodede.

- Den ytre ballongen fylles med en 60 ml sprøyte med sterilt saltvann gjennom det blå røret.
- Den indre ballongen fylles med seks 60 ml-sprøyter med luft ( $350 \text{ cm}^3$ ) gjennom den transparente slangen. Ballongen kan overfylles til maks  $420 \text{ cm}^3$ .
- Blodposen har en gjennomsiktig slange med rød fargekoding. Luftventilen må alltid være tilkoblet for å kunne overvåke blodtapet.

Kateteret som helhet veier kun 30 gram, noe som minimerer risikoen for at ballongen sklir ut.

Oppblåsing og tømning av ballongenes innhold er svært enkel, og det er også mulig å omplassere kateteret dersom det skulle bli feilplassert ved første forsøk. Inneholder kateter, 60 ml sprøyte og pose

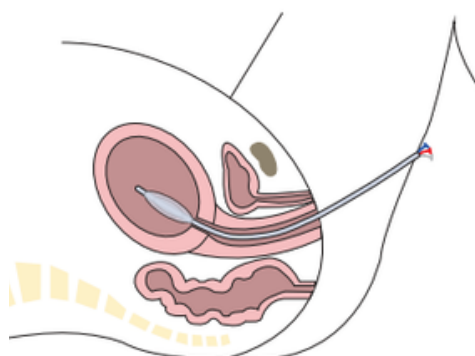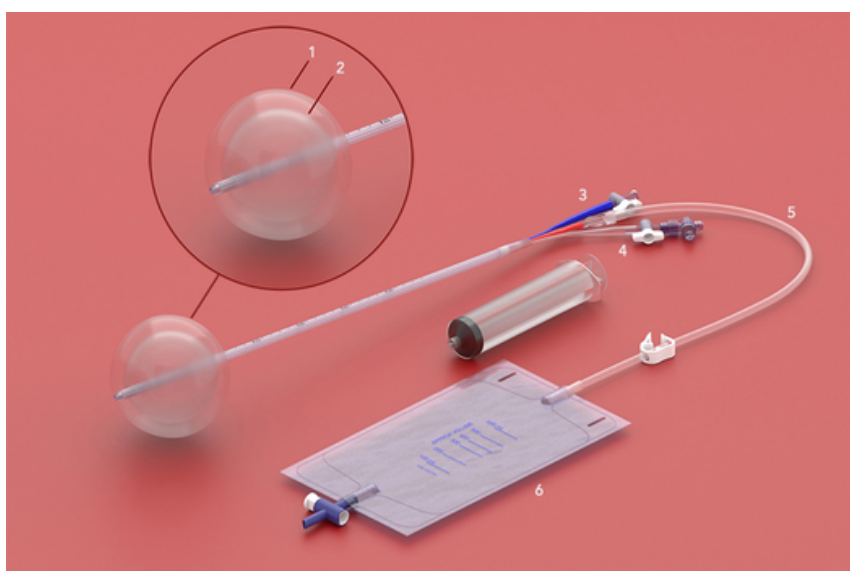

| Art.nr | Navn      | Størrelse | Ytre Ø | Steril / ikke steril | Antall/pk. |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 720264 | Metrastop | 54 cm     | 24 Fr  | Steril               | 2 stk      |